


INDICAȚII DE UTILIZARE

Seringa cu dezactivare automată este destinată utilizării în aspirarea și injectarea vaccinului în scopuri medicale. În plus, după injectarea în corp, pistonul poate fi blocat automat de mecanism pentru a preveni reutilizarea acestei seringi.

Grupul sau grupurile țintă de pacienți: întreaga populație.

STRUCTURA PRINCIPALĂ ȘI PERFORMANȚA

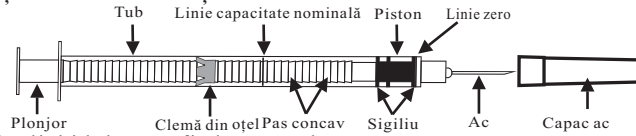


- Tubul este transparent, neted, iar lichidul poate fi observat clar.
- În același plan, plonjorul poate fi observat vizibil la aceeași distanță de pasul concav, care stabilește zona distructivă.
- Clema de oțel, situată între tub și plonjor, se distruge după utilizare.
- Seringa în sine are un ac hipodermic conectat și fix.
- Beneficii clinice preconizate: livrare inteligentă și precisă a medicamentelor la cerere; reducerea reacțiilor adverse sistemice, cum ar fi roșeața, durerea, umflarea; risc redus de leziuni ale acului.
- Caracteristici de performanță: Injectarea dozei de precizie, Evitați utilizarea secundară și contaminarea încrucișată.

Specificație: TKADS03: 0,1 ml, 0,2 ml, 0,25ml, 0,3 ml, 0,4 ml, 0,5 ml, 1 ml. Dimensiune ac: De la 23G la 31G

UTILIZARE

- 1) Dezlipiți ambalajul steril.
- 2) Îndepărtați capacul de protecție fără să atingeți acul.
- 3) Nu trageți plonjorul înapoi înainte de a utiliza seringă.
- 4) Inșerați acul în capacul curat din plastic al flaconului vaccinului și luați o doză.
- 5) Eliminați aerul sau vaccinul în exces, reglați pistonul la doza indicată a vaccinului.
- 6) Injectați vaccinul.
- 7) Trageți seringă înapoi.
- 8) Depuneți seringă utilizată în cutia de siguranță (nu umpleți până la refuz cutia de siguranță).

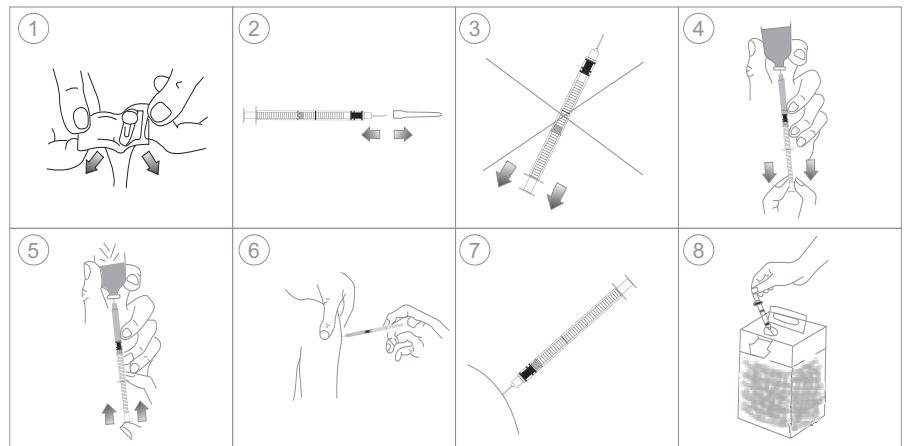

PRECAUȚII

- Orientați acul în sus și eliminați tot aerul din tubul seringii, în cazul în care există aer care poate fi injectat în corpul uman.
- În cazul funcționării anormale, nu trageți de plonjor. Când trageți lichid, nu împingeți înapoi, deoarece acest lucru va distruge produsul.
- Dispozitivul trebuie să fie steril și apirogen înainte de deschiderea ambalajului.
- Perioada maximă de valabilitate este de cinci ani. Nu utilizați dispozitivul dacă este expirat.

AVERTISMENTE

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau se găsesc corpuri străine.
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect.
- Produsele nu pot fi reutilizate, deoarece utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80%, temperaturile variază de la -10 la 40°C.

SIMBOLURI

Identificator unic al dispozitivului	Cod lot	Număr de catalog	Atenție	Sterilizat prin folosirea de oxid de etilenă	
Data de fabricație	Producător	Prevenție reutilizare	A nu se refolosi	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat	
Dispozitiv medical	A se folosi până la data de	A nu se resteriliza	Fragil, a se manipula cu grijă	Limita temperaturii	
A se ține departe de lumina soarelui	A se păstra uscat	Apirogen	Cu partea aceasta în sus	Limitarea umidității	
Sistem unic de barieră sterilă		Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj protector pe dinafară		REV.: B/0 DATA: 2023-06-30	