




INSTRUCCIONES PARA LAS JERINGAS DE DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

INDICACIONES DE USO

La jeringa de desactivación automática está destinada a la extracción e inyección de vacunas con fines médicos. Después de la inyección, el émbolo será bloqueado automáticamente por el mecanismo para evitar la reutilización de esta jeringa.


ESTRUCTURA PRINCIPAL Y RENDIMIENTO

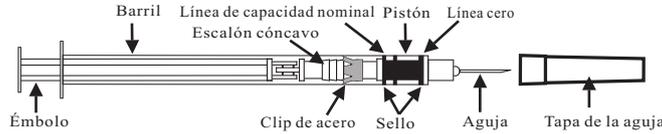

- El tubo es transparente, liso y se puede observar el líquido claramente.
- Desde el mismo tubo se puede ver el émbolo, a la misma distancia del paso cóncavo, que establece el área de destrucción.
- El clip de acero, entre el tubo y el émbolo, debe destruirse después de su uso.
- La jeringa debe fijarse con la aguja hipodérmica.
- Especificaciones: TKADS03: 0,05ml. Tamaño de la aguja: 23G a 31G

USO

- 1) Abra el envoltorio estéril.
- 2) Retire la tapa protectora sin tocar la aguja.
- 3) No tire del émbolo hacia atrás antes de utilizar la jeringa.
- 4) Introduzca la aguja en la tapa de goma limpia del vial de la vacuna y extraiga una dosis.
- 5) Expulse el aire o no se pase de la dosis de la vacuna, ajustando el émbolo a la dosis de vacuna indicada.
- 6) Inyecte la vacuna.
- 7) Retire la jeringa.
- 8) Coloque la jeringa usada en la caja de seguridad (no llene la caja de seguridad en exceso)

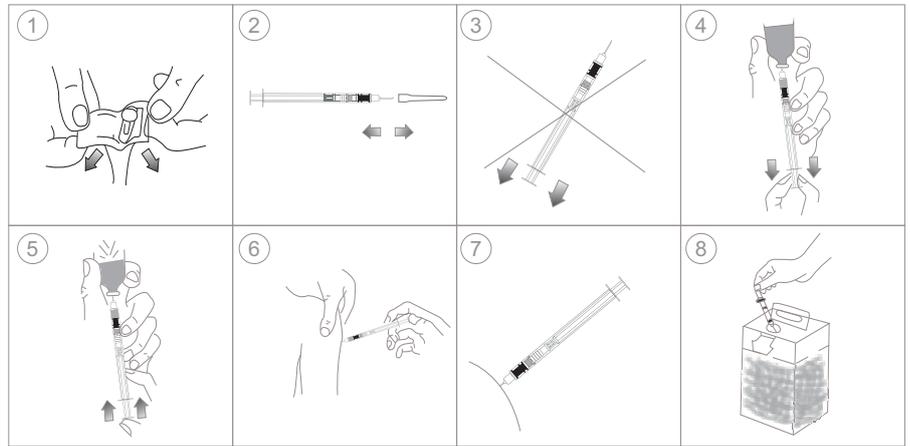

PRECAUCIONES

- Apunta la aguja hacia arriba y expulse todo el aire de la jeringa para evitar que se inyecte en el cuerpo humano.
- Funcionamiento anormal, no tire del émbolo. Al extraer el líquido, no tire hacia atrás, ya que podría dañar el producto.
- Antes de abrir el paquete, asegúrese de hacerlo en un lugar estéril y no pirogénico.
- Tiene un periodo de validez de cinco años. No utilizar si ha superado la fecha de validez.

ADVERTENCIAS

- No utilice si el paquete está abierto o dañado, o si la tapa protectora está separada o se encuentra alguna materia extraña;
- Debe ser utilizado por una persona capacitada, y la piel debe ser esterilizada.
- Los productos no pueden ser reutilizados. Su uso repetido puede causar infecciones cruzadas, incluso enfermedades graves, como la hepatitis, el VIH y otras enfermedades infecciosas.

ALMACENAMIENTO

-El producto debe ser mantenido bajo una humedad relativa menor al 80%, libre de gases corrosivos, fresco, seco, con buena ventilación y limpio.

SÍMBOLOS

	Identificador único del dispositivo		Código de lote		Número de catálogo		Precaución		Esterilizado con óxido de etileno
	Fecha de fabricación		Fabricante		Prevención de reutilización		No reutilizar		No utilizar si el paquete está dañado
	Dispositivo médico		Fecha de caducidad		No volver a esterilizar		Frágil, manipular con cuidado		
	Mantener alejado de la luz del sol		Mantener seco		No pirogénico		Desde aquí hacia arriba		
	Sistema de barrera estéril simple				Sistema de barrera estéril simple con paquete protector exterior			REV.:A/0 FECHA: 08-03-2022	