




ANLEITUNGEN FÜR Spritzen mit automatischer Deaktivierung

ANWENDUNGSANWEISUNGEN

Die automatische Deaktivierungsspritze ist für den Einsatz in der Absaugung und Injektion von Impfstoffen für medizinische Zwecke bestimmt. Zusätzlich kann der Kolben nach der Injektion in den Körper automatisch durch den Mechanismus verriegelt werden, um die Wiederverwendung dieser Spritze zu verhindern.

Patientengruppe oder Patientengruppen: Alle Bevölkerungsgruppen.

DIE HAUPTSTRUKTUR UND LEISTUNG

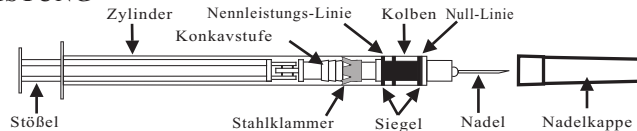


- Der Zylinder ist transparent, glatt und die Flüssigkeit kann gut überwacht werden.
- Der Stößel kann in der gleichen Ebene sichtbar beobachtet werden, im gleichen Abstand des konkaven Schritts, der den Vernichtungsbereich einstellt.
- Der Stahlclip zwischen dem Zylinder und der Stößel sind nach der Verwendung zu vernichten.
- Die Spritze selbst hat eine fest angeschlossene Injektionsnadel.
- Erwartete klinische Vorteile: intelligente und präzise Arzneimittellabgabe bei Bedarf; verminderte systemische Nebenwirkungen wie Rötung, Schmerzen, Schwellung; Verringerter Risiko von Nadelstichverletzungen.
- Leistungsmerkmale: Präzisionsdosisinjektion, Vermeiden Sie Sekundärgebrauch und Kreuzkontamination.

Spezifikation: TKADS03: 0,05ml. Nadelgröße: 23G bis 31G

ANWENDUNG

- 1) Reißen Sie die sterile Verpackung auf.
- 2) Entfernen Sie die Schutzkappe, ohne die Nadel zu berühren.
- 3) Ziehen Sie den Stößel nicht rückwärts, bevor Sie die Spritze benutzen.
- 4) Führen Sie die Nadel in die saubere Gummikappe des Impfstoff-Fläschchens ein und saugen Sie eine Dosis auf.
- 5) Stoßen Sie die Luft oder den überschüssigen Impfstoff aus, indem Sie den Stößel auf die angegebene Impfstoffdosis einstellen.
- 6) Spritzen Sie den Impfstoff ein.
- 7) Ziehen Sie die Spritze heraus.
- 8) Legen Sie die benutzte Spritze in die Sicherheitsbox (die Sicherheitsbox darf nicht überfüllt werden)

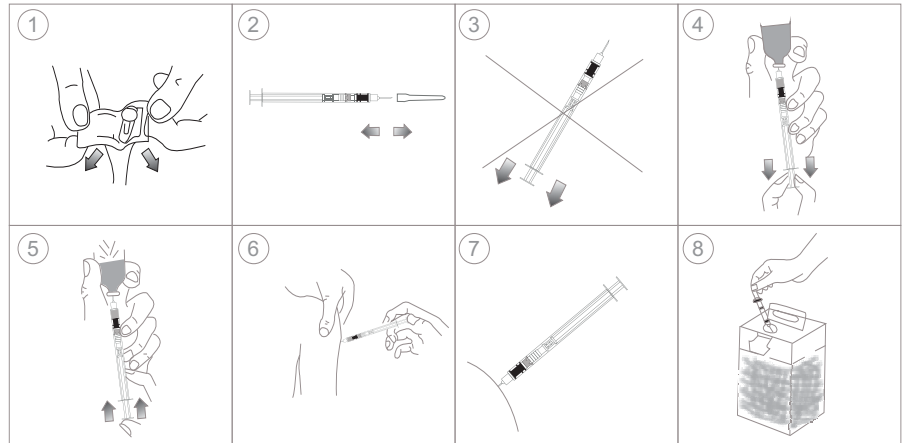

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Halten Sie die Nadel nach oben und verdrängen Sie die gesamte Luft im Zylinder der Spritze, um zu verhindern, dass Luft in den menschlichen Körper eingespritzt wird.
- Abnormale Funktion, ziehen Sie nicht am Stößel. Die Flüssigkeit wird aufgesaugt, nicht rückwärts schieben, andernfalls wird das Produkt möglicherweise zerstört.
- Sie sollte vor dem Öffnen der Verpackung steril und pyrogenfrei sein.
- Sie hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren. Verwenden Sie sie nicht, wenn das Gültigkeitsdatum überschritten wurde.

WARNUNGEN

- Verwenden Sie sie nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist, wenn die Schutzkappe entfernt wurde oder wenn sich Fremdkörper darin befinden.
- Es sollte von einer besonders geschulten Person verwendet werden, und die Haut sollte korrekt sterilisiert werden.
- Die Produkte können nicht wiederverwendet werden, die wiederholte Verwendung kann Kreuzinfektionen und sogar schwere Krankheiten wie Hepatitis, HIV und andere Infektionskrankheiten verursachen.

LAGERUNG

Produkt sollte in einem Zustand gehalten werden, dass relative Feuchtigkeit kleiner als 80%, Temperaturbereiche von -10 bis 40°C ist.

SYMBOLE

Eindeutige Gerätekennung	Chargencode	Katalognummer	Vorsicht	Mit Ethylenoxid sterilisiert	
Herstellungsdatum	Hersteller	Wiederverwendungsschutz	Nicht wiederverwenden	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist	
Medizinisches Gerät	Haltbarkeitsdatum	Nicht erneut sterilisieren	Zerbrechlich, mit Vorsicht zu behandeln	Temperatur Grenzwert	
Vom Sonnenlicht fernhalten	Trocken halten	Pyrogenfrei	Diese Seite nach oben	Feuchtigkeit Begrenzung	
Einzelnes Sterilbarriere-System		Einfaches Sterilbarrieresystem mit Außenschutzverpackung		REV.: B/0 DATUM: 2023-06-30	