




# INSTRUCCIONES PARA LAS JERINGAS DE DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

## INDICACIONES DE USO

Jeringas de falla automática para aspiración e inyección de vacunas con fines médicos. Además, después de la inyección en el cuerpo, el émbolo puede ser bloqueado automáticamente por el mecanismo para evitar la reutilización de la jeringa.

Grupo objetivo de pacientes: todos los grupos de población.

## ESTRUCTURA PRINCIPAL Y RENDIMIENTO

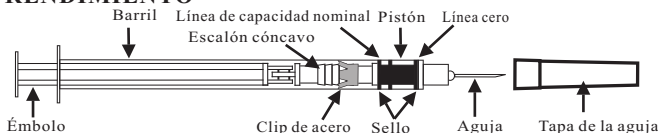


- El tubo es transparente, liso y se puede observar el líquido claramente.
- Desde el mismo tubo se puede ver el émbolo, a la misma distancia del paso cóncavo, que establece el área de destrucción.
- El clip de acero, entre el tubo y el émbolo, debe destruirse después de su uso.
- La jeringa debe fijarse con la aguja hipodérmica.
- Beneficios clínicos esperados: entrega inteligente y precisa de medicamentos bajo demanda; Reducir los efectos secundarios sistémicos, como enrojecimiento, dolor e hinchazón; Reducir el riesgo de lesiones por acupuntura.
- Características de rendimiento: inyección de dosis precisas para evitar el uso secundario y la contaminación cruzada.

**Especificaciones:** TKADS03: 0,05ml. Tamaño de la aguja: 23G a 31G

## USO

- 1) Abra el envoltorio estéril.
- 2) Retire la tapa protectora sin tocar la aguja.
- 3) No tire del émbolo hacia atrás antes de utilizar la jeringa.
- 4) Introduzca la aguja en la tapa de goma limpia del vial de la vacuna y extraiga una dosis.
- 5) Expulse el aire o no se pase de la dosis de la vacuna, ajustando el émbolo a la dosis de vacuna indicada.
- 6) Inyecte la vacuna.
- 7) Retire la jeringa.
- 8) Coloque la jeringa usada en la caja de seguridad (no lleno la caja de seguridad en exceso)

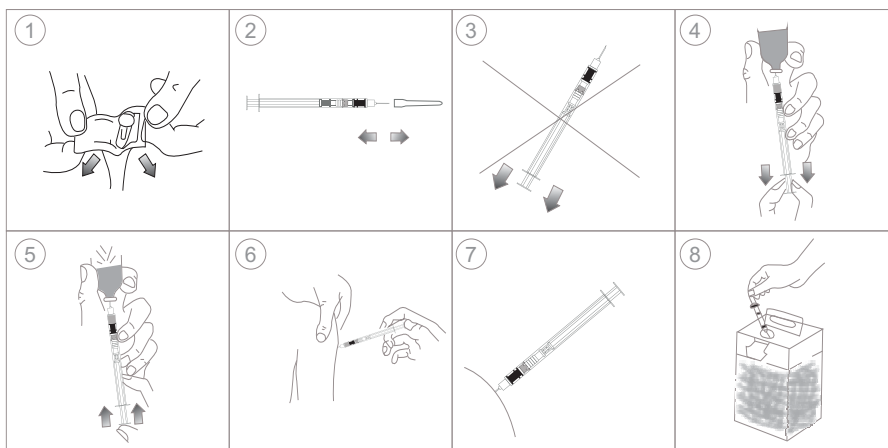

## PRECAUCIONES

- Apunta la aguja hacia arriba y expulse todo el aire de la jeringa para evitar que se inyecte en el cuerpo humano.
- Funcionamiento anormal, no tire del émbolo. Al extraer el líquido, no tire hacia atrás, ya que podría dañar el producto.
- Antes de abrir el paquete, asegúrese de hacerlo en un lugar estéril y no pirogénico.
- Tiene un periodo de validez de cinco años. No utilizar si ha superado la fecha de validez.

## ADVERTENCIAS

- No utilice si el paquete está abierto o dañado, o si la tapa protectora está separada o se encuentra alguna materia extraña;
- Debe ser utilizado por una persona capacitada, y la piel debe ser esterilizada.
- Los productos no pueden ser reutilizados. Su uso repetido puede causar infecciones cruzadas, incluso enfermedades graves, como la hepatitis, el VIH y otras enfermedades infecciosas.

## ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse a una humedad relativa inferior al 80% y con un rango de temperatura de - 10 a 40 ° c.

## SÍMBOLOS

Identificador único del dispositivo	Código de lote	Número de catálogo	Precaución	Esterilizado con óxido de etileno
Fecha de fabricación	Fabricante	Prevención de reutilización	No reutilizar	No utilizar si el paquete está dañado
Dispositivo médico	Fecha de caducidad	No volver a esterilizar	Frágil, manipular con cuidado	Límite de temperatura
Mantener alejado de la luz del sol	Mantener seco	No pirogénico	Desde aquí hacia arriba	Límite de humedad
Sistema de barrera estéril simple	Sistema de barrera estéril simple con paquete protector exterior	REV.: B/0 FECHA: 30-06-2023		

