



ANLEITUNGEN FÜR Spritzen mit automatischer Deaktivierung

ANWENDUNGSANWEISUNGEN

Die Spritzen mit automatischer Deaktivierung sind spezifisch für das Einspritzen von Medikamenten in den menschlichen Körper vorgesehen.

Hauptstruktur und Eigenschaften

- Dieses Produkt besteht aus Zylinder, Stößel, Kolben und Nadel.
- Die Spritze verfügt über eine automatische Deaktivierungsfunktion und wird aktiviert, sobald der Stößel vollständig gegen den Boden des Zylinders gedrückt wird.
- Dieser Zylinder sollte ausreichend sauber und transparent sein, um leicht überwacht werden zu können.
- Der Zylinder und der Kolben sind gut aufeinander abgestimmt und verfügen über eine gute Gleiteigenschaft, sodass sie einfach zu verwenden sind.
- Der Stößel ist leicht handzuhaben und zu verwenden.

SPEZIFIKATION

- TKADS01: 1ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- TKADS02: 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- Nadelgröße: 18G bis 30G

ANWENDUNG

- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Gültigkeitsdauer und die Vollständigkeit der Verpackung;
- Reißen Sie die Verpackung an der Schnittstelle auf und entnehmen Sie die Spritze mit der Nadel;
- Drücken und ziehen Sie den Stößel, bis er gut geschmiert ist;
- Verbinden Sie die Spritze fest mit der Nadel;
- Entfernen Sie die Schutzkappe der Nadel und führen Sie dann die erforderlichen Sterilisationsvorgänge durch.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Halten Sie die Nadel nach oben und verdrängen Sie die gesamte Luft im Zylinder der Spritze, um zu verhindern, dass Luft in den menschlichen Körper eingespritzt wird.
- Sie sollte vor dem Öffnen der Verpackung steril und pyrogenfrei sein.
- Sie hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren. Verwenden Sie sie nicht, wenn das Gültigkeitsdatum überschritten wurde.

WARNUNGEN

- Verwenden Sie sie nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist, wenn die Schutzkappe entfernt wurde oder wenn sich Fremdkörper darin befinden.
- Es sollte von einer besonders geschulten Person verwendet werden, und die Haut sollte korrekt sterilisiert werden.
- Die Produkte können nicht wiederverwendet werden, die wiederholte Verwendung kann Kreuzinfektionen und sogar schwere Krankheiten wie Hepatitis, HIV und andere Infektionskrankheiten verursachen.

LAGERUNG

Das Produkt sollte in einem Zustand aufbewahrt werden, in dem die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 80% beträgt, es sollte zusätzlich frei von korrosiven Gasen, kühl, trocken, gut belüftet und sauber sein.

SYMBOLE

Eindeutige Gerätekennung	Chargencode	Katalognummer	Vorsicht	Mit Ethylenoxid sterilisiert
Herstellungsdatum	Hersteller	Wiederverwendungsschutz	Nicht wiederverwenden	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
Medizinisches Gerät	Haltbarkeitsdatum	Nicht erneut sterilisieren	Zerbrechlich, mit Vorsicht zu behandeln	
Vom Sonnenlicht fernhalten	Trocken halten	Pyrogenfrei	Diese Seite nach oben	
Einzelnes Sterilbarriere-System		Einfaches Sterilbarrieresystem mit Außenschutzverpackung		REV.:A/0 DATUM: 2022-03-08