



INSTRUCCIONES PARA LAS JERINGAS DE DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

INDICACIONES DE USO

Las jeringas de desactivación automática están especialmente diseñadas como una herramienta para la inyección de medicamentos en el cuerpo humano.

Estructura y propiedades principales

- Este producto consta de un tubo, émbolo, pistón y aguja.
- La jeringa tiene la función de desactivación automática, la cual iniciará cuando el émbolo se empuje de forma completa a la parte inferior del tubo.
- La jeringa debe estar limpia y tener la transparencia suficiente para facilitar la inspección.
- El tubo y el pistón se ajustan bien y tiene un buen deslizamiento, y es fácil de usar.
- El émbolo es fácil de manejar y utilizar.

ESPECIFICACIÓN

- TKADS01: 1ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- TKADS02: 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- Tamaño de la aguja: 18G a 30G

USO

- En primer lugar, revise el período de validez y la integridad del paquete antes de utilizar la jeringa;
- Abra el paquete por la parte cortada y saque la jeringa con la aguja;
- Empuje y tire del émbolo hasta que esté bien lubricado;
- Conecte bien la jeringa con la aguja;
- Retire el capuchón protector de la aguja, y luego realice el proceso de esterilización requerido.

PRECAUCIONES

- Apunta la aguja hacia arriba y expulse todo el aire de la jeringa para evitar que se inyecte en el cuerpo humano.
- Antes de abrir el paquete, asegúrese de hacerlo en un lugar estéril y no pirogénico.
- Tiene un periodo de validez de cinco años. No utilizar si ha superado la fecha de validez.

ADVERTENCIAS

- No utilice si el paquete está abierto o dañado, o si la tapa protectora está separada o se encuentra alguna materia extraña;
- Debe ser utilizado por una persona capacitada, y la piel debe ser esterilizada.
- Los productos no pueden ser reutilizados. Su uso repetido puede causar infecciones cruzadas, incluso enfermedades graves, como la hepatitis, el VIH y otras enfermedades infecciosas.

ALMACENAMIENTO

El producto debe guardarse bajo una humedad relativa inferior al 80%, en un lugar libre de gases corrosivos, fresco, seco, con buena ventilación y limpio.

SÍMBOLOS

UDI Identificador único del dispositivo	LOT Código de lote	REF Número de catálogo	Precaución	Esterilizado con óxido de etileno
Fecha de fabricación	Fabricante	Prevención de reutilización	No reutilizar	No utilizar si el paquete está dañado
Dispositivo médico	Fecha de caducidad	No volver a esterilizar	Frágil, manipular con cuidado	
Mantener alejado de la luz del sol	Mantener seco	No pirogénico	Desde aquí hacia arriba	
Sistema de barrera estéril simple		Sistema de barrera estéril simple con paquete protector exterior		REV.:A/0 FECHA: 08-03-2022