



ANLEITUNGEN FÜR Spritzen mit automatischer Deaktivierung

ANWENDUNGSANWEISUNGEN

Die Auto Disable Spritzen sind speziell als Werkzeug für Injektionsmedizin in den menschlichen Körper entwickelt. Die automatische Deaktivierungsfunktion wird bei Verabreichung der beabsichtigten Dosis automatisch aktiviert, um eine spätere Wiederverwendung der Spritze zu verhindern.

Patientengruppe oder Patientengruppen: Alle Bevölkerungsgruppen.

Hauptstruktur und Eigenschaften

- Dieses Produkt besteht aus Zylinder, Stößel, Kolben und Nadel.
- Die Spritze verfügt über eine automatische Deaktivierungsfunktion und wird die aktiviert wird, sobald der Stößel vollständig gegen den Boden des Zylinders gedrückt wird.
- Dieser Zylinder sollte ausreichend sauber und transparent sein, um leicht überwacht werden zu können.
- Der Zylinder und der Kolben sind gut aufeinander abgestimmt und verfügen über eine gute Gleiteigenschaft, sodass sie einfach zu verwenden sind.
- Der Stößel ist leicht handzuhaben und zu verwenden.
- Erwartete klinische Vorteile: intelligente und präzise Arzneimittelabgabe bei Bedarf; verminderte systemische Nebenwirkungen wie Rötung, Schmerzen, Schwellung; Verringeres Risiko von Nadelstichverletzungen.
- Leistungsmerkmale: Präzisionsdosisinjektion, Vermeiden Sie Sekundärgebrauch und Kreuzkontamination.

SPEZIFIKATION

- TKADS01: 1ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- TKADS02: 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- Nadelgröße: 18G bis 30G

ANWENDUNG

- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Gültigkeitsdauer und die Vollständigkeit der Verpackung;
- Reißen Sie die Verpackung an der Schnittstelle auf und entnehmen Sie die Spritze mit der Nadel;
- Drücken und ziehen Sie den Stößel, bis er gut geschmiert ist;
- Verbinden Sie die Spritze fest mit der Nadel;
- Entfernen Sie die Schutzkappe der Nadel und führen Sie dann die erforderlichen Sterilisationsvorgänge durch.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Halten Sie die Nadel nach oben und verdrängen Sie die gesamte Luft im Zylinder der Spritze, um zu verhindern, dass Luft in den menschlichen Körper eingespritzt wird.
- Sie sollte vor dem Öffnen der Verpackung steril und pyrogenfrei sein.
- Sie hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren. Verwenden Sie sie nicht, wenn das Gültigkeitsdatum überschritten wurde.

WARNUNGEN

- Verwenden Sie sie nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist, wenn die Schutzkappe entfernt wurde oder wenn sich Fremdkörper darin befinden.
- Es sollte von einer besonders geschulten Person verwendet werden, und die Haut sollte korrekt sterilisiert werden.
- Die Produkte können nicht wiederverwendet werden, die wiederholte Verwendung kann Kreuzinfektionen und sogar schwere Krankheiten wie Hepatitis, HIV und andere Infektionskrankheiten verursachen.

LAGERUNG

Produkt sollte in einem Zustand gehalten werden, dass relative Feuchtigkeit kleiner als 80%, Temperaturbereiche von -10 bis 40°C ist.

SYMBOLE

Eindeutige Gerätekenung	Chargencode	Katalognummer	Vorsicht	Mit Ethylenoxid sterilisiert
Herstellungsdatum	Hersteller	Wiederverwendungsschutz	Nicht wiederverwenden	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
Medizinisches Gerät	Haltbarkeitsdatum	Nicht erneut sterilisieren	Zerbrechlich, mit Vorsicht zu behandeln	Temperatur Grenzwert
Vom Sonnenlicht fernhalten	Trocken halten	Pyrogenfrei	Diese Seite nach oben	Feuchtigkeit Begrenzung
Einzelnes Sterilbarriere-System	Einfaches Sterilbarrieresystem mit Außenschutzverpackung	REV.: B/0 DATUM: 2023-06-30		