



INSTRUCCIONES PARA LAS AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES

INDICACIONES DE USO

La aguja hipodérmica de un solo uso se utiliza para la inyección hipodérmica. Se adapta en pacientes de diferentes edades, y es un método básico de infusión.

Estructura y propiedades principales

- El producto consta de una tapa protectora, aguja, y soporte de la aguja;
- Este producto tiene una buena rigidez, dureza y resistencia a la corrosión;
- La tapa protectora y el soporte de la aguja encajan bien, y nunca se soltarán por sí mismo.

ESPECIFICACIÓN

18G a 30G

USO

- Se utiliza junto con otros instrumentos médicos;
- Revise el periodo de validez y la integridad de los productos antes de usarlos;
- Abra el paquete desde la zona de apertura y saque la aguja hipodérmica;
- Conéctela firmemente con la jeringa;
- Saque la tapa protectora de la aguja. Luego, realice el proceso de esterilización.

PRECAUCIONES

- Expulse todo el aire del barril de la aguja hacia arriba, para evitar inyectarlo en el cuerpo humano;
- Antes de abrir el paquete, asegúrese de que el lugar haya sido esterilizado y esté libre de pirógenos;
- Su periodo de validez es de cinco años. No utilice las agujas si se ha pasado del periodo de validez;
- Desechar después de un solo uso.

ADVERTENCIAS

- No utilice el equipo si el paquete está abierto o dañado, si la tapa protectora se ha sacado, si se ha perdido alguna pieza, o si se encuentra alguna materia extraña;
- Debe ser utilizado por una persona especialmente capacitada, y la piel debe estar esterilizada de forma acorde;
- Los productos no pueden ser reutilizados. El uso repetido del equipo puede causar infecciones cruzadas, incluso enfermedades graves como la hepatitis, el VIH y otras enfermedades infecciosas.

ALMACENAMIENTO

El producto debe guardarse bajo una humedad relativa inferior al 80%, en un lugar libre de gases corrosivos, fresco, seco, con buena ventilación y limpio.

NO REUTILIZAR	NO UTILIZAR SI EL PAQUETE ESTÁ DAÑADO	STERILE ESTÉRIL	STERILE EO ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO
MD DISPOSITIVO MÉDICO	UDI IDENTIFICADOR ÚNICO DEL DISPOSITIVO	PRECAUCIÓN	CE 2862
Sistema de barrera estéril simple	Sistema de barrera estéril simple con paquete protector exterior	REV.: A/0 VIGENTE: 24-01-2022	