



INSTRUCCIONES DE LAS JERINGAS DESECHABLES

INDICACIONES DE USO

Las jeringas desechables han sido diseñadas como una herramienta para la inyección de solución venosa e hipodérmica al cuerpo humano. Las jeringas desechables deben utilizarse junto con la aguja.

Estructura y propiedades principales

- Este producto consta de un tubo, émbolo y pistón.
- La jeringa debe estar limpia y tener la transparencia suficiente para facilitar la inspección.
- El tubo y el pistón se ajustan bien y tiene un buen deslizamiento, y es fácil de usar.
- El émbolo es fácil de manejar y utilizar.

ESPECIFICACIÓN

- Jeringas de tres partes de 1 ml a 60 ml;
- Jeringas de dos partes de 2 ml a 20 ml.

USO

- En primer lugar, revise el período de validez y la integridad del paquete antes de utilizar la jeringa;
- Rompa el paquete por la parte cortada y saque la jeringa sin aguja;
- Empuje y tire del émbolo hasta que esté bien lubricado;
- Conecte la jeringa con la aguja, y asegúrese de que quede bien conectada;
- Retire el capuchón protector de la aguja, y luego realice el proceso de esterilización requerido.

Advertencias y precauciones

- Expulse todo el aire de la jeringa hacia arriba, para evitar que se forme gas al inyectar aire en los vasos sanguíneos del cuerpo humano o que se forme un tumor en el tejido subcutáneo;
- Antes de abrir el paquete, asegúrese de que el lugar haya sido esterilizado y esté libre de pirógenos;
- El producto tiene un periodo de validez de cinco años. No lo utilice si ha superado la fecha de vencimiento;
- Descarte después de un solo uso;
- No utilice si el paquete está abierto o dañado, o si la tapa protectora está separada o se encuentra alguna materia extraña;
- Debe ser utilizado por una persona especialmente capacitada, y la piel debe estar esterilizada de forma acorde;
- Los productos no pueden ser reutilizados. El uso repetido del equipo puede causar infecciones cruzadas, incluso enfermedades graves como la hepatitis, el VIH y otras enfermedades infecciosas.

ALMACENAMIENTO

El producto debe guardarse bajo una humedad relativa inferior al 80%, en un lugar libre de gases corrosivos, fresco, seco, con buena ventilación y limpio.

Identificador único del dispositivo	Código de lote	Número de catálogo	Precaución	Esterilizado usando óxido de etileno
Fecha de fabricación	Fabricante	Consulte las instrucciones Para uso	No reutilizar	No utilice si el paquete está dañado
Dispositivo médico	Fecha de vencimiento	No se reesterilice	Frágil, manejar con cuidado	temperatura límite
Manténgase alejado de la luz solar	Mantener seco	No pirogénico	Por aquí arriba.	Humedad limitación
Sistema de barrera estéril único	estéril		REV.: C/0	Fecha efectiva: 2025-05-30

Anhui Tiankang Medical Technology Co., Ltd.
No. 228, Weiye Road, Economic Development Zone, Tianchang City, Anhui Province, P.R. China.

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80 20537 Hamburg, Germany
Tel:0049-40-2513175