



INSTRUCȚIUNI PENTRU ACELE HIPODERMICE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE

Acul hipodermic de unică folosință poate fi utilizat pentru injecția hipodermică. Se potrivește pentru utilizatorii de vârste diferite și se bazează pe metodele simple de perfuzare.

Structura principală și proprietățile

- Produsul se compune din capac protector și ac, precum și suport ac;
- Produsul are o bună caracteristică de rigiditate, duritate și rezistență la coroziune;
- Capacul protector și scaunul acului se potrivesc perfect și nu se vor pierde.

SPECIFICAȚII

De la 18G la 30G

UTILIZARE

- Se folosește împreună cu alte echipamente medicale;
- Verificați perioada de valabilitate și integralitatea produsele înainte de utilizare;
- Deschideți pachetul din partea care se dezlipește și scoateți acul hipodermic;
- Conectați-l ferm cu seringă;
- Scoateți capacul protector al acului. Apoi, realizați o manipulare aseptică.

PRECAUȚII

- Orientați acul în sus și eliminați tot aerul din tub, în cazul în care există aer care poate fi injectat în corpul uman;
- Dispozitivul trebuie să fie steril și apirogen înaintea deschiderii ambalajului;
- Perioada de valabilitate este de cinci ani, nu utilizați dispozitivul dacă este expirat;
- A se arunca după utilizarea unică.

AVERTISMENTE

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau lipsesc componente sau se găsesc corpuri străine;
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect;
- Produsele nu pot fi refolosite. Utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80% și trebuie să fie lipsită de gaz coroziv, rece, uscată și cu bună ventilație și curată.

Identificator unic al dispozitivului	Codul lotului	Numărul de catalog	Atenție	Sterilizat cu oxid de etilenă
Data de fabricație	Producător	Consultați instrucțiunile Pentru utilizare	Nu reutilizați	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
Dispozitiv medical	Data de expirare	Nu restarilizați	Fragilă, Manipulați cu grijă	Temperatură limită
Păstrați-vă departe de lumina soarelui	Păstrați uscat	Non-pirogenic	Pe aici sus.	Umiditate limitare
Sistem unic de barieră sterilă	sterilă			REV.: C/O Data efectivă: 2025-05-30